

# EVA DOUCHE®

## Irigatori za jednokratnu upotrebu

EVA DOUCHE® su blagi vodeni rastvori za vaginalnu upotrebu, specijalno formulisani za mehaničko čišćenje vagine dok pružaju (u zavisnosti od njihovog sastava):

- oslobađanje od iritacije, svraba ili peckanja,
- hidrataciju suve i oslabljene vaginalne sluznice,
- osvežavanje,
- dezodorizaciju i
- efikasno uklanjanje akumulirane vaginalne hipersekrecije i menstrualnih ostataka.

EVA DOUCHE® ne sadrže sapune, boje, parfeme, iritante ili alergene, dok se njihovo dejstvo zasniva na prirodnim sastojcima a ne na farmaceutskim supstancama ili hormonima.

Svi EVA DOUCHE® irigatori su spremni za upotrebu, sa uvek konstantnim sastavom, napunjeni sa po 147mL rastvora. Dostupni su u providnim, savitljivim, lakim za upotrebu irigatorima za jednokratnu upotrebu sa specijalnom mlaznicom. Na taj način obezbeđuju:

- maksimalnu bezbednost po korisnika tokom upotrebe
- prevenciju od rekontaminacije usled kontaminacije rastvora nakon ponovljene upotrebe, posebno pri uslovima koji pogoduju infekciji (npr. osetljivost na vaginalno krvarenje)
- izbegavanje transporta patogenih mikroorganizama ka cerviksu i uterusu.

Koristite 1 do 2 puta nedeljno (ukoliko ne postoji specifična etiologija ili savet stručnjaka). EVA DOUCHE® pojačava prirodni proces vaginalnog čišćenja i pomaže u očuvanju higijene vaginalnog područja.

### KADA JE ISPIRANJE POTREBNO?

Vaginalno ispiranje je efikasna pomoć u održavanju vagine u normalnim uslovima i očuvanju vaginalne flore. Jedno do dva vaginalna ispiranja nedeljno pomažu normalnom čišćenju vagine na prirodan način i uklanjaju stranih agenasa koji mogu izazvati infekcije. U slučajevima vaginitisa, vaginalno ispiranje nakon saveta lekara pomaže farmaceutskom tretmanu, jer omogućava uklanjanje vaginalne hipersekrecije, a istovremeno pruža olakšanje od svraba i pulsirajućih senzacija koje su obično prisutne kod vaginitisa.

Možete vršiti vaginalno ispiranje:

- Kada osećate vaginalnu suvoću
- Kada osećate blagu iritaciju
- Na kraju menstrualnog ciklusa, uklonite menstrualne ostatke.
- Nakon seksualnog odnosa kako bi se uklonili ostaci kontracepcijskih gelova ili krema.
- Za uklanjanje sekreta koji uzrokuju neprijatan miris.
- Jednostavno da bi ste se osećali osveženo.

### KAKO IZBABRATI KOJI JE EVA DOUCHE POGODAN ZA VAS:

Svaki EVA DOUCHE® je specijalno dizajniran da odgovori vašim potrebama na najefikasniji i bezbedan način.

Izaberite između:

- EVA DOUCHE® Chamomile sa antiiritantnim dejstvom
- EVA DOUCHE® Baking Soda za efikasno uklanjanje akumuliranih vaginalnih hipersekrecija (leukoreja), posebno u slučajevima gljivične etiologije
- EVA DOUCHE® Post-Menstrual za uklanjanje ostataka menstruacije nakon kraja menstrualnog perioda
- EVA DOUCHE® Normal sa dezodorantnim dejstvom
- EVA DOUCHE® Aloe Vera sa hidratantnim dejstvom

\* Za učestalost upotrebe pogledajte uputstvo na pakovanju proizvoda koji odgovara vašim potrebama ili se obratite vašem lekaru.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU:



### PRIMENA:

<b>PRVI KORAK</b>	Držite bočicu u uspravnom položaju levom rukom, tako da palac i kažiprst pridržavaju čep boce, a zatim drugom rukom pritisnite poklopac kako biste ga slomili i uklonili zaštitni poklopac sa mlaznice (slika 1).
<b>DRUGI KORAK</b>	Pažljivo povucite vaginalnu mlaznicu ka spolja dok ne čujete "klik" (slika 2) i nežno stisnite bočicu da biste videli da li je sigurnosni ventil otvoren. Ako ventil nije otvoren, vratite mlaznicu nazad u bočicu i ponovite postupak.
<b>TREĆI KORAK</b>	Posle opuštanja postavite mlaznicu u vaginu (otprilike 7,5cm) i izvodite ispiranje nežno i stabilno stiskajući bočicu.

**NAPOMENA:** U slučaju da u bočici ostane značajna količina rastvora za čišćenje, izvadite bočicu iz vagine i ponovite postupak ispiranja sa preostalim količinom rastvora za čišćenje.

### PREPORUČENE POZICIJE ZA ISPIRANJE SU:

1) sedeći u toaletu, 2) u kadi, stojeći ili sedeći.

# EVA DOUCHE®

za čišćenje, dezodorizaciju i zaštitu vaginalnog područja na prirodan način

NAZIV PROIZVODA	VRSTA ISPIRANJA	STAROSNA GRUPA	CILJ UPOTREBE
Chamomile pH 4.2	Specijalno umirujuće i olakšavajuće ispiranje	Svi uzrasti	Olakšanje od manjih iritacija, svraba i peckanja
Baking Soda pH 9.0	Aktivno ispiranje	Svi uzrasti	Oslobađanje od akumuliranog sekreta i patoloških ili normalnih hipersekrecija (leukoreja)
Post-Menstrual pH 7.0	Specijalno ispiranje po završetku menstruacije	Žene koje imaju menstruaciju	Efikasno uklanjanje ostatka nakon menstruacije
Normal 3.0	Normalno sredstvo za ispiranje sa kiselom pH vrednošću	Svi uzrasti	Normalna upotreba za čišćenje, dezodorisanje i osvežavanje
Aloe Vera pH 4.2	Specijalno sredstvo za ispiranje koje vlaži i omekšava	Svi uzrasti	Popravlja i obnavlja prirodnu vlažnost

CE 0653

MEDICINSKO SREDSTVO

Ne sadrži hormone, farmaceutske supstance, veštačke boje, mirise i paraben



Proizvođač: IOULIA AND IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A., "INTERMED S.A."  
Ulica: 27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia, GRČKA  
ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE: [www.mojaEVA.rs/](http://www.mojaEVA.rs/) Besplatna info linija: 0800 25 20 00  
Nosilac upisa, uvoznik i distributer za Srbiju: Braf d.o.o., 11080 Beograd - Zemun, Lazara Mamuzića 28  
Rešenje broj: XXX-XX-XXXX-XX-XXX od DD.MM.YYYY



07.2018 V.1 I133...