

EVA

MOIST®

Hidratantni vulvovaginalni lubrikantni gel namenjen za umirenje simptoma vaginalne suvoće

pH 5.0

Momentalno vraća prirodnu vlažnost vagini na prirodan način i efikasno suzbija simptome vaginalne suvoće, kao što su svrab, iritacija, osećaj suvoće i nelagodnost tokom seksualnog odnosa (dispareunija).

EVA MOIST® i prirodno olakšanje vaginalne suvoće

Nema razloga da tolerišete suvoću vagine. Nasuprot vazelinu ili losionima koji nisu posebno dizajnirani da se suoče sa simptomima vaginalne suvoće, **EVA MOIST®** je siguran preparat i ne izaziva iritaciju jer sadrži uglavnom vodu. Pored toga, ekstrakti kamilice i aloje koje sadrži, pružaju vagini prirodnu vlažnost, dok umiruju, olakšavaju i ublažavaju iritacije, osećaj peckanja i svrab. Pošto **EVA MOIST®** ne sadrži nadražujuće sastojke, može se koristiti svakodnevno i često koliko god je potrebno kako bi se ublažili simptomi vaginalne suvoće.

Šta je EVA MOIST®

Intermed S.A. Pharmaceutical Laboratories, kompanija specijalizovana za proizvode za ličnu negu, sa dugogodišnjim iskustvom stvorila je **EVA MOIST®**, hidrosolubilni gel za tretiranje suve vagine i vulve. **EVA MOIST®** je vodeni, neiritirajući gel. Na prirodan način vraća vlažnost vagini, jer ne sadrži vazelin i može da se koristiti često koliko god je potrebno. **EVA MOIST®** je bez hormona i ne sadrži farmaceutske supstance. Sadrži kamilicu i ekstrakte aloje koje vulvovaginalno područje čine zaštićenim i hidratiranim, umanjujući osećaj iritacije, peckanja i svraba.

Dopunjuje i vraća prirodnu

vlažnost vagini i vulvi

✓ **Sa kamilicom i alojom**
✓ **BEZ PARABENA**



EVA MOIST SRB/10.2018

CE 0653

MEDICINSKO SREDSTVO

NE SADRŽI:

- Petrohemiju (mineralna ulja / vazelin)
- Silikone • Etanolamine

KOMPATIBILNO SA KONDOMIMA

PROIZVOD	NAMENA	STAROSNA GRUPA	OSOBINE
EVA MOIST® Hidratantni vulvovaginalni lubrikantni gel	Da održi prirodnu vlažnost u vagini i umanjiti simptome vaginalne suvoće.	Za sve starosne dobi, a posebno žene u menopauzi, jer je vaginalna suvča obično rezultat menopauze.	Vraća vlažnost vagini na prirodan način i štiti delikatnu vaginalnu sluznicu od iritacije i upale. Efikasno tretira simptome suvoće vagine, kao što su svrab, peckanje, iritacija i bolni seksualni odnosi (dispareunija).

Uputstvo za upotrebu


EVA MOIST® se može primeniti spolja ili interno aplikacijom prstima ili pomoću priloženih vaginalnih aplikatora, zavisno od vaših ličnih potreba. U zavisnosti od potreba, možete primeniti veću ili manju količinu.

A) primjena prstima



Stisnite tubu kako bi količina gela pokrila prst i primenite u vaginalni otvor i / ili spoljašnji vaginalni prostor, u zavisnosti od vaših potreba.

B) Primena pomoću vaginalnog aplikatora (količina 5g)

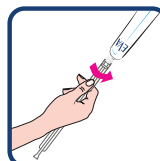

Zavrnite specijalni vaginalni aplikator i nežno stisnite da popunite aplikator **EVA MOIST®** gelom dok klip ne prestane da se kreće (do linije). Odvijte aplikator i nežno ubacite prednji deo aplikatora u vaginu. Držite aplikator čvrsto i neprekidno jednim rukom, a sa druge strane pritisnite klip dok se ne zaustavi. Pažljivo uklonite aplikator i odbacite. Kutija sadrži 9 aplikatora (jednokratna upotreba), predviđenih da iskoriste celu količinu **EVA MOIST®** gela na higijenski i bezbedan način.

Oprez

EVA MOIST® NIJE KONTRACEPTIV.

Izbegavajte kontakt proizvoda sa očima i ušima. Čuvati na sobnoj temperaturi, van domašaja dece.

SASTOJCI: Hidrosolubilni gel sa kamilicom i alojom



Proizvođač: IOULIA AND IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A., "INTERMED S.A."

Ulica: 27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia, GRČKA

ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE: www.mojaEVA.rs/ Besplatna info linija: 0800 25 20 00

Nosilac upisa, uvoznik i distributer za Srbiju: Braf d.o.o., 11080 Beograd - Zemun, Lazara Mamuzića 28

Rešenje broj: 515-02-00837-18-001 od 26.10.2018 godine



SRBIA
"DOPUNJENJE
KVALITETA"

SRBIA
"DOPUNJENJE
KVALITETA"

CERTIFIED M.S.
EN ISO 13485:2014
45/11/2009