

ActiSperm[®] Specijalizovani vaginalni lubrikant

Pogodan za povećanje plodnosti

pH 7.2

Specijalizovani lubrikant koji čuva vitalnost sperme

i povećava šanse začeća

Šta je ACTISPERM[®]

Milioni parova širom sveta pokušavaju da ostvare trudnoću, tako što imaju planirane odnose tokom ovulacije. Međutim, s obzirom na činjenicu da će samo mali procenat uspeti sa začećem u svakom ciklusu, ova procedura predstavlja stres za parove koji su nestrpljivi u pogledu začeća.

Stres i psihološki pritisak često dovode do pojave vaginalne suvoće što umanjuje šanse začeća čak čineći odnos bolnim usled neadekvatnog vaginalnog podmazivanja (dispareunija).

Ovi parovi će koristiti lubrikant kako bi olakšali odnos, ali ne znaju da upotreba uobičajenih lubrikanata dodatno smanjuje šanse za začećem, jer svi obični lubrikanti stvaraju nepovoljnu sredinu u vagini koja utiče na vitalnost sperme.

ACTISPERM[®] je hidrosolubilni lubrikant u obliku gela, koji sadrži posebno odabrane sastojke koji stvaraju povoljno okruženje za spermatozoide u vagini, povećavajući mobilnost i vitalnost spermatozoida. Ima pH vrednost 7,2 koja obezbeđuje vitalnost, integritet i efikasnost spermatozoida, čime povećava šanse za začećem.

NAZIV PROIZVODA	NAMENA	STAROSNA GRUPA	KARAKTERISTIKE
ActiSperm[®] Specializovani vaginalni lubrikant, pogodan za povećanje plodnosti.	Namenjen za podmazivanje vagine i stvaranje neophodnih uslova za poboljšanje pokretljivosti i vitalnosti spermatozoida, kako bi povećao šanse za začeće.	Reproduktivno doba	Posebano formulisan hidrosolubilni vaginalni lubrikant koji stvara povoljan ambijent za spermatozoide u vagini tako što provocira prirodnu vaginalnu sekreciju. Ima odgovarajuću pH (7,2) vrednost koja obezbeđuje vitalnost spermatozoida dok se posebnim prirodnim sastojcima koje sadrži, osigurava njihov integritet i efikasnost.



MEDICINSKO SREDSTVO

ActiSperm[®] Specijalizovani vaginalni lubrikant

Pogodan za povećanje plodnosti

pH 7.2


Indikacije

ACTISPERM[®] je vaginalni lubrikant namenjen za upotrebu pre odnosa, za podmazivanje vagine i stvaranje prikladne sredine koja održava vitalnost spermatozoida, povećavajući šanse za začeće.


Primena

ACTISPERM[®] može da se primeni do 15 minuta pre polnog odnosa. Aplikacijom pre polnog odnosa i omogućavanjem da se zadrži u vagini poboljšava disperziju i favorizuje spontanost tokom odnosa.

- 1 Držite aplikator sa proširene strane. Usmerite uzak kraj aplikatora ka zemlji i protresite kako bi se sadržaj pokrenuo u pravcu raspršivača.
- 2 Zadržite aplikator tako da raspršivač bude usmeren ka zemlji. Prelomite sigurnosni poklopac sa raspršivača kako biste otvorili aplikator (slika 1)
- 3 Ubacite raspršivač duboko u vaginu (slika 2), u ležećem položaju i pritisnite drugi kraj aplikatora kako bi se istisnula cela količina **ACTISPERM[®]**-a u vaginu. Zadržite pritisak na aplikator dok ga ne izvadite iz vagine.
- 4 Ukoliko ne iskoristite sav **ACTISPERM[®]** sadržan u aplikatoru, nemojte ga čuvati za buduću upotrebu. Trebalo bi propisno odbaciti neiskorišćeni proizvod.
- 5 Ukoliko **ACTISPERM[®]** iscuri iz vagine posle njegove primene, može se lako ukloniti brisanjem vulve suvim papirom.

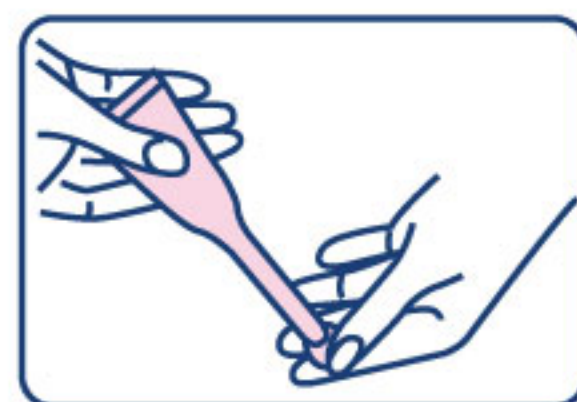

(slika 1)

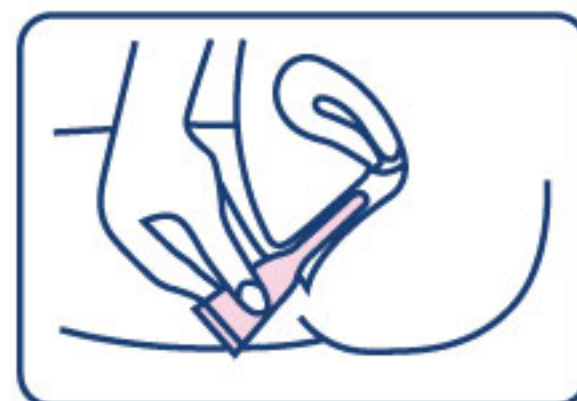

(slika 2)

Mere opreza - Upozorenja

- **ACTISPERM[®]** nije kontraceptivno sredstvo. Ne ubija spermatozoide i ne ometa njihovu funkciju.
- Ukoliko primena **ACTISPERM[®]**-a izazove iritaciju ili nelagodnost, prekinite upotrebu. Simptomi obično nestaju nakon prekida upotrebe proizvoda. Ako simptomi potraju obratite se lekaru.
- Ne koristite proizvod ako imate aktivnu vaginalnu infekciju ili povredu. Ako ste nedavno imali operaciju, obratite se lekaru pre korišćenja proizvoda.
- Čuvajte proizvod na sobnoj temperaturi, van domašaja dece.

Pakovanje: 6 vaginalnih aplikatora ispunjenih sa po 5 ml.



Proizvođač: IOULIA AND IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A., "INTERMED S.A."

Ulica: 27 Kalyftaki str, 145 64 Kifissia, GRČKA

Nosilac upisa, uvoznik i distributer za Srbiju: Braf d.o.o., 11080 Beograd - Zemun, Lazara Mamuzića 28

Rešenje broj: 515-02-00851-18-001 od 03.05.2019.

ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE: www.mojaEVA.rs

Nosilac upisa, uvoznik i distributer za Crnu Goru: Poen d.o.o., 85320 Tivat, Donja Lastva bb

Rješenje broj: 2070/18/888-6116 od 03.12.2018.

ZA VIŠE INFORMACIJA POSJETITE: www.mojaEVA.me

